

## Aerosolbehandlung und Ihre Katze

Die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen ist für die Verwendung mit einem Inhaliergerät zur Verabreichung der Aerosolmedikation an Ihre Katze vorgesehen.



Die Verabreichung von Aerosolmedikation über Aerosoldosier- oder Inhaliergeräte wird bereits seit 1960 zur Behandlung von Atemwegserkrankungen beim Menschen eingesetzt. Da feline Atemwegserkrankungen ähnlich sind wie beim Menschen, können sie auch auf ähnliche Art und Weise behandelt werden.<sup>2</sup> Da normale Inhaliergeräte jedoch eine Dosis mit mehr als 90 km/h abgeben<sup>3</sup>, ist eine effektive Verabreichung der Medikation an Katzen ohne eine Aerosolkammer sehr schwierig.





Wenn die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen an das Inhaliergerät angeschlossen ist, kann Ihre Katze normal atmen und die Aerosolmedikation inhalieren, so dass das Medikament tief in die Lungen der Katzen eindringt, wo es seine Wirkung entfalten kann. Ohne die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen kann Ihre Katze die Medikation nicht vollständig nutzen, da der größte Teil nur in den Mund oder Hals gelangt.

Mehr über die Wissenschaft der Aerosole finden Sie auf unserer Website unter

[www.aerokat.com](http://www.aerokat.com)

## Gebrauchsanleitung:

Vollständige Anleitungen sind der Packungsbeilage zu entnehmen.

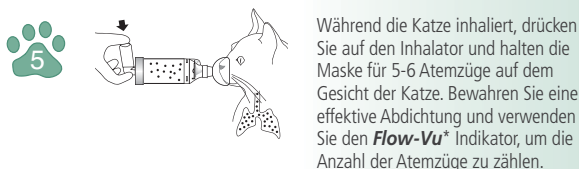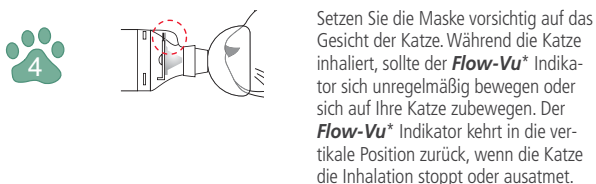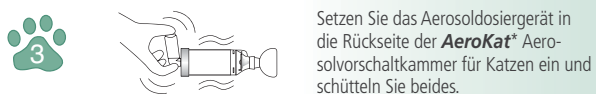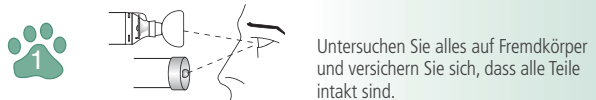

Vertrieb:

**AeroKat\***

Aerosolvorschaltkammer für Katzen

Hersteller:

Trudell Medical International<sup>1</sup>

725 Third Street, London, Ontario, Kanada, N5V 5G4  
Telefon: +1-519-455-7060 Fax: +1-519-455-7858  
Gebührenfrei innerhalb von Nordamerika: 1-800-465-3296  
E-Mail: aerokat@trudellmed.com


MD-768B-0408. \* Marken und eingetragene Marken von Trudell Medical International. fab ist eine Marke des Feline Advisory Bureau. Copyright © Trudell Medical International 2001, 2002, 2005, 2007, 2009. Alle Rechte vorbehalten. Durch die US-Patente 5,848,588, 6,345,617, 6,435,177 geschützt. Weitere Patente angemeldet.

<sup>1</sup> Padrid, Philip. „Feline Asthma: Diagnosis and Treatment“ in Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice Vol. 30 No. 6, November 2000 S. 1284

<sup>2</sup> idem, „ibid.“, S. 1285

<sup>3</sup> Newman S. „Deposition and Effects of Inhalation Aerosols“. Lund, Schweden; AB Draco; 1983, 13-22

## AEROSOLMEDIKAMENTENVERABREICHUNG für FELINES ASTHMA

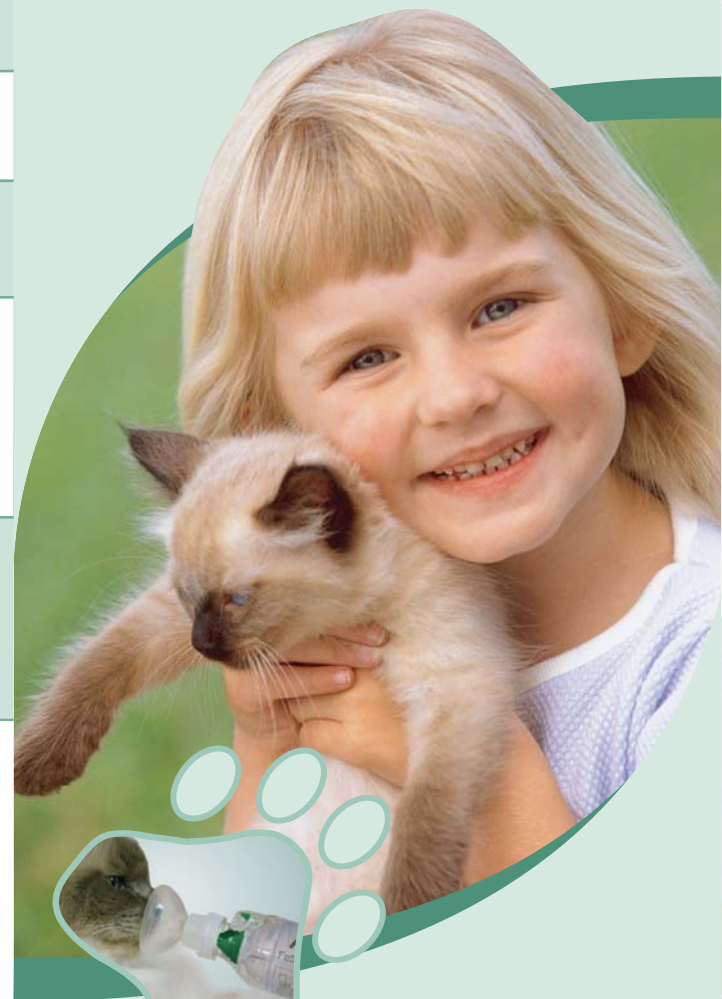

**AeroKat\***


Aerosolvorschaltkammer für Katzen

[www.aerokat.com](http://www.aerokat.com)

# Leidet Ihre Katze unter Asthmasymptomen?

Wenn Ihre Katze eines der folgenden Symptome aufweist, könnte sie unter felinem Asthma leiden:

- häufiges Keuchen
- anhaltender Husten
- offener Mund oder Schwierigkeiten beim Atmen

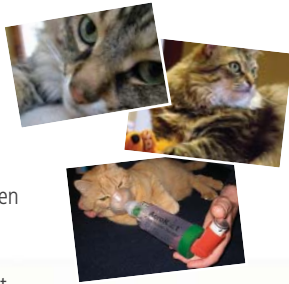

Ungefähr jede hundertste Katze hat Asthma – vielleicht sogar mehr, da die Symptome oft mit Haarballen verwechselt werden. Asthma tritt gewöhnlich bei 2 bis 8 Jahre alten Katzen ein und kommt bei siamesischen und Himalaya-Rassen häufiger vor.



## AeroKat\* Aerosolvorschaltkammer für Katzen – Produktmerkmale

Der **Flow-Vu\*** Indikator auf der **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen

Der **Flow-Vu\*** Indikator auf der **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen hilft Ihnen dabei, zu zählen, wie viele Atemzüge Ihre Katze gemacht hat und sicherzustellen, dass die Maske ausreichend dicht auf dem Gesicht der Katze sitzt. Dadurch wird sichergestellt, dass das Aerosolmedikament in die tiefsten Lungenareale der Katze gelangt.

Wenn der **Flow-Vu\*** Indikator sich unregelmäßig bewegt oder sich auf Ihre Katze zubewegt, inhaliert die Katze – und Sie sollten den Inhalator drücken. Wenn die Inhalation stoppt, kehrt der **Flow-Vu\*** Indikator wieder in die vertikale Position zurück. Diese erhöhte Kontrolle ermöglicht Ihnen eine bessere Behandlung des Asthmas Ihrer Katze.



- Leicht zu verwenden und zu reinigen
- Reduziert die Risiken der mit Tabletten, Injektionen oder Sirup assoziierten Nebenwirkungen
- Eine einzigartige bruchsichere antistatische Kammer stellt sicher, dass die Medikation tief in die Lungen der Katze geliefert wird
- 2 Maskengrößen für Katzen jeder Rasse und Größe
- Ein Exhalationsventil lenkt die Luft von der Katze weg, um eine Reizung zu verhindern

**AeroKat\***  
Aerosolvorschaltkammer für Katzen

## Häufig gestellte Fragen

### 1 Wo kann ich die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen kaufen?

Viele Tierärzte verkaufen die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen in ihrer Klinik, Sie können sie jedoch auch über unsere Website erhalten ([www.aerokat.com](http://www.aerokat.com)). Bitte sprechen Sie vor dem Kauf mit dem Tierarzt Ihrer Katze, um sich zu vergewissern, dass die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen für den Zustand Ihrer Katze geeignet ist.

### 2 Wie funktioniert die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen?

Die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen enthält das Medikament (Corticosteroid oder Bronchodilatator), damit es von Ihrer Katze über mehrere Atemzüge hinweg eingeatmet werden kann. Außerdem trennt die Kammer die groben Aerosolpartikel (die sich meist in Mund und Nase ablagern), so dass die feineren, wirksameren Partikel tief in die Lungen vordringen können, wo sie gebraucht werden.

### 3 Welche Medikamente können mit der **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen verwendet werden?

Die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen ist für den Gebrauch mit allen landläufig verordneten Inhalationsmedikamenten vorgesehen. Ihr Tierarzt bestimmt, welches Medikament für Ihre Katze geeignet ist.

### 4 Warum sollte ich dieses Gerät herkömmlichen oralen Steroiden vorziehen?

Herkömmliche orale Corticosteroide (Tabletten, Injektionen oder Sirup) haben viele potenziell schwerwiegende Nebenwirkungen für Ihre Katze, einschließlich Pankreatitis, Insulinresistenz (Diabetes), Polyurie, Zystitis, unangemessenes Urinieren und Verhaltensänderungen.<sup>1</sup>

### 5 Gibt es einen Grund, warum meine Katze die **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen nicht verwenden sollte?

Es gibt keine spezifischen Kontraindikationen für den Gebrauch der **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen bei Katzen. Das Prinzip der **AeroKat\*** Aerosolvorschaltkammer für Katzen basiert auf der Verabreichung von Aerosolmedikamenten, wie sie derzeit bei Menschen, Pferden und Hunden verwendet wird. Das Produkt sollte nur auf Empfehlung eines Tierarztes verwendet werden.

