



Urintest Kits für Hunde & Katzen

 **Pezz life GmbH**

Alser Strasse 24/6
1090 Wien, Österreich

markus@pezz.life
www.pezz.life

MADE IN AUSTRIA



Vorsorge rettet Tierleben

Haustiere können völlig gesund aussehen - aber schwer krank sein. Denn sie zeigen Symptome erst sehr spät im Krankheitsverlauf.

„80% der Tierärzte belegen: Haustiere werden zu spät behandelt.“

BVA Vet. Survey 2014

„Nierenversagen wird erst sichtbar, wenn 70% des Gewebes zerstört sind.“

P.M.Y. Smets et al., 2010



Der Vorsorgetest für zuhause

Hunde und Katzen vor Schmerzen schützen bevor sie entstehen mit dem Urintest Kit von Pezz®.



- ✓ Unkompliziert zuhause testen, ohne Stress für Mensch und Tier.
- ✓ Zuverlässig Nieren-, Harnwegserkrankungen und Diabetes im Frühstadium erkennen.
- ✓ Wissen, wann ein Tierarztbesuch notwendig ist bevor Symptome sichtbar werden.

Kit für Hunde

Inhalt



Urintestschale

Die Testschale macht den Kit zur einfachsten und hygienischsten Methode, eine Probe zu sammeln seit es Urintests gibt. Jede Testschale ist mit unserem ISO-zertifizierten Urinteststreifen ausgestattet und aus Bio-Kunststoff hergestellt.




Haltestange

Kein Bücken, kein Anschleichen und vor allem kein Hundeurin an den Fingern dank unserer ausziehbaren Haltestange aus umweltschonendem Karton.




Anleitung

1

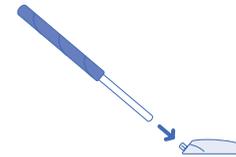


Zusammenbauen

2

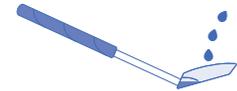


Sammeln

3

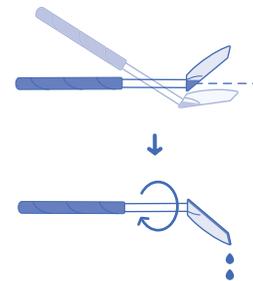

Umdrehen / Ausleeren

4

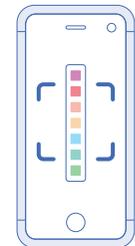

Unterseite scannen


Kit für Katzen

Inhalt



Urintestschale

Eine Urintestschale mit integriertem Teststreifen speziell für Katzen und eine Haltestange für eine einfache und hygienische Anwendung.

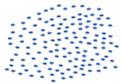

Bio-Spezialstreu

350g nichtsaugendes Spezialstreu aus recyclebarem Biokunststoff.



Abdeckfolie

Eine Abdeckfolie für das Katzenklo um lästiges Putzen zu vermeiden.




Spritze

Eine Spritze zum Aufziehen des Urins inklusive Verschluss.


Anleitung

1

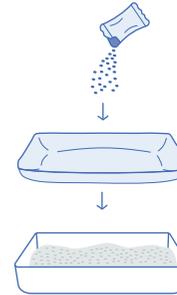


Abdecken / Einstreuen

2

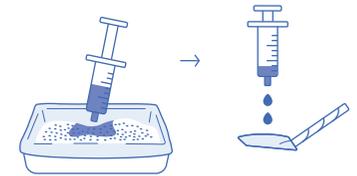


Urin in Schale füllen

3

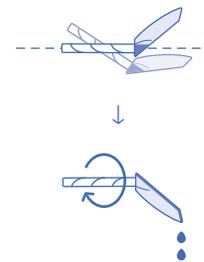

Umdrehen / Ausleeren

4

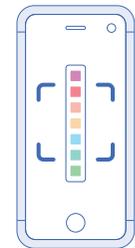

Unterseite scannen

Pezz App

Die App zeigt an, ob alle Werte im grünen Bereich sind oder ob ein Tierarztbesuch notwendig ist.




- ✓ Auswertung der Tests mit neuester Technologie
- ✓ Verständliches Ergebnis mit Handlungsempfehlung
- ✓ Digitaler Impfpass und TA-Finder mit Öffnungszeiten

Krankheiten erkennen

Mit dem Urin scheiden Hunde und Katzen Giftstoffe und Substanzen aus, die dem Test als Grundlage dienen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen.



Die Testwerte

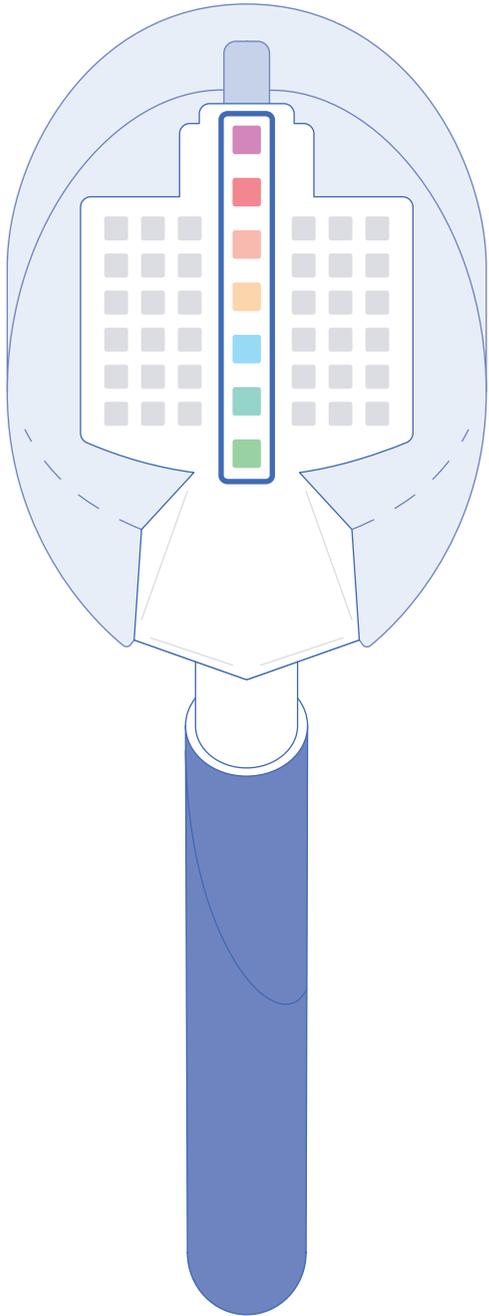

Hämoglobin (Blut)

Hämoglobin im Urin kann auf eine Infektion, eine Entzündung oder Steine in der Blase oder den Nieren hinweisen.




Ketone

Ketone sind zum Beispiel bei Diabetes oder Fieber in größerer Menge nachweisbar.



Die Testwerte

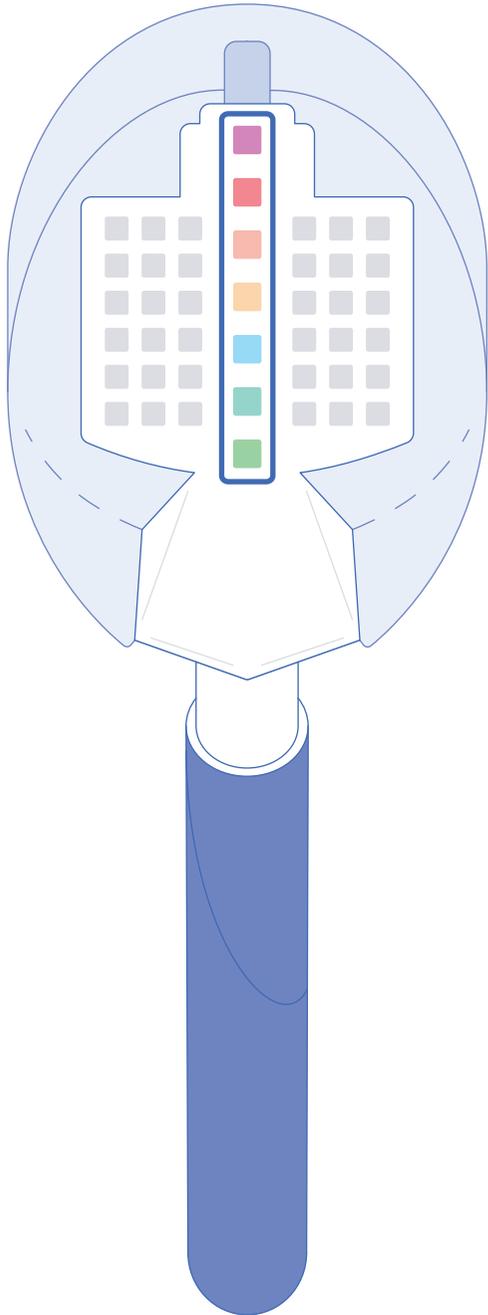

Glukose (Zucker)

Glukose im Urin ist ein Warnsignal für Diabetes mellitus, Krebserkrankungen und Schädigungen der Nieren durch Vergiftung.




Protein

Ein erhöhter Protein-Wert kann ein Hinweis auf Nierenerkrankungen oder eine bakterielle Infektion sein.



Die Testwerte

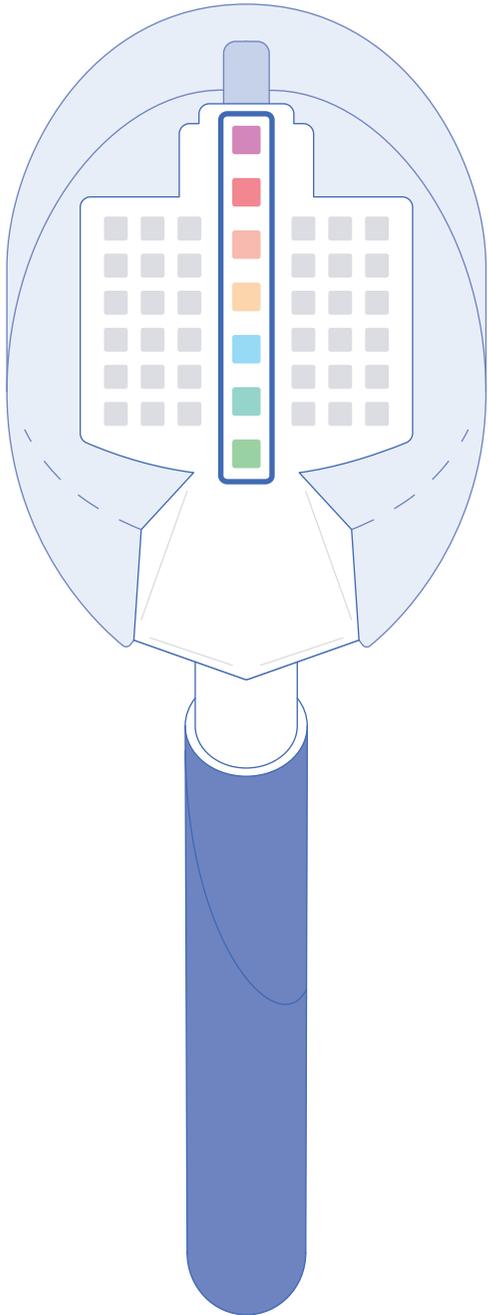

pH-Wert

Durch einen sauren oder alkalischen Urin-pH können sich Kristalle und Blasensteine bilden und Bakterien ansiedeln.




Spezifisches Gewicht (nur bei Hunden)

Das spezifische Gewicht dient der ungefähren Abschätzung des Wasserhaushalts und der Nierenfunktion. Der Wert ist nur eine Momentaufnahme und bei Katzen nicht aussagekräftig.



Die Testwerte

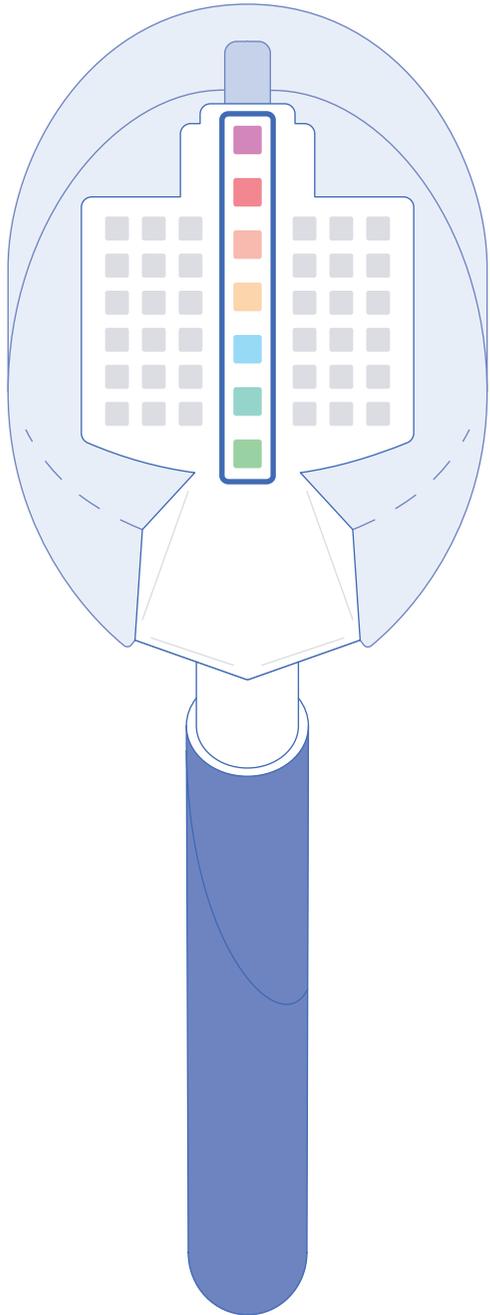

Leukozyten (nur bei Hunden)

Leukozyten können in größerer Menge auf entzündliche Erkrankungen der Nieren oder der ableitenden Harnwege hinweisen. Der Wert ist bei Katzen nicht aussagekräftig.



Regelmäßig vorsorgen



*„In meinem Beruf sehe ich jeden Tag Hunde und Katzen mit schwerwiegenden Krankheiten, die kaum Symptome zeigen. Um die Prognose signifikant zu verbessern, empfehle ich neben der routinemäßigen Jahreskontrollen beim Tierarzt, **mindestens vier Urintests pro Jahr durchzuführen** - auch wenn das Tier völlig gesund wirkt.“*

Mag. Janina Rauch, Chef-Tierärztin Pezz life

Häufige Fragen

Welche Krankheiten kann man damit erkennen?

Urin entsteht in den Nieren, die das Blut reinigen und entgiften. Mit dem Urin scheiden Hunde und Katzen die Giftstoffe und Substanzen aus, die dem Test als Grundlage dienen, um Krankheiten frühzeitig zu erkennen. Der Test liefert unter anderem Hinweise auf Nierenversagen, Entzündungen, Tumore und Diabetes lange bevor erste Symptome sichtbar werden.

Ist der Test ein Ersatz für den Tierarzt?

Nein, auf keinen Fall! Der Urintest Kit dient als Ergänzung zu routinemäßigen Untersuchungen beim Tierarzt. Das Ziel ist, durch regelmäßige Vorsorge Nieren-, Harnwegserkrankungen und Diabetes im Frühstadium zu erkennen und damit zu wissen, wann ein Tierarztbesuch notwendig ist bevor Symptome sichtbar werden.

Funktioniert der Test auch ohne App?

Der Test funktioniert nur in Kombination mit der Pezz App. Die App wurde speziell dafür entwickelt, Urintests standardisiert auszuwerten. Jeder Befund wird von unseren Expert*innen binnen weniger Stunden geprüft und dann automatisch in der App angezeigt.

Häufige Fragen

Kann ich die Komponenten des Test Kits wiederverwenden?

Nein, die Bestandteile des Kits können nur einmal verwendet werden. Das hat zum einen den Grund, dass der integrierte Urinteststreifen nur einmal verwendbar ist. Zum anderen können durch das Auswaschen Rückstände in der Testschale oder im Streu zurückbleiben.

Was sagt mir das Ergebnis?

Das Ergebnis gibt an, ob alle Werte im grünen Bereich sind oder ob ein Tierarztbesuch notwendig ist. Dabei wird zwischen leicht abnormalen und abnormalen Werten unterschieden. Leicht abnormale Werte sollen bei der nächsten Routineuntersuchung abgeklärt werden, abnormale Werte am besten sofort.

Was unterscheidet den Urintest Kit von Pezz von herkömmlichen Teststreifen?

Zum einen ist es der mit Abstand einfachste und hygienischste Weg, eine Probe zu sammeln seit es Urintests gibt. Zum anderen werden durch die sterile Testschale Verunreinigungen der Probe verhindert. Durch die digitale Auswertung mit der App kann der Test zuverlässig und standardisiert ausgewertet werden.

Unsere Tipps

Für besonders anspruchsvolle Katzen:



- ✓ Das Katzenklo entleeren, mit Wasser reinigen und die Abdeckfolie weglassen. Achtung: Bitte verwende keine Putzmittel, da die Chemikalien den Test beeinflussen können.
- ✓ Lass deiner Katze Zeit, sich in Ruhe mit dem Klo vertraut zu machen. Ständige Beobachtungen führen zu einem erhöhten Stresslevel.
- ✓ Sei geduldig! Für deine Katze ist das eine neue Situation.
- ✓ Das Katzenklo sollte die einzige Möglichkeit sein, ein Geschäft zu verrichten.

Unsere Tipps

Für etwas schreckhafte Hunde:



- ✓ Schon vor dem Testen ist die Haltestange während der Spaziergänge mit dabei und wird dem Hund mehrmals gezeigt und vorgehalten.
- ✓ Nähere dich langsam, sobald dein Hund die entsprechenden Zeichen zum Wasserlassen zeigt. Nach erfolgter Annäherung und nachdem der Hund uriniert hat, gibt es eine kleine Belohnung.
- ✓ Halte das Sammelwerkzeug, wenn alle Anzeichen auf Wasserlassen deuten, vorsichtig in den Urinstrahl. Im besten Fall erwischst du den Mittelstrahlurin und lässt die ersten Tropfen des Urins daneben gehen.

Unser Kontakt

Wir stehen bei allen Fragen auch gerne persönlich zur Verfügung.



Markus Zengerer
Gründer & Geschäftsführer
markus@pezz.life



Mag. Janina Rauch
Chef-Tierärztin
janina@pezz.life



 **Pezz life GmbH**

Alser Strasse 24/6
1090 Wien, Österreich

markus@pezz.life
www.pezz.life

MADE IN AUSTRIA

